

Obrotowe
ostrze umożli-
wiający uzyskanie
wielu ostrych
krawędzi
tnących

Ergonomiczne
użytkowanie

Bone Scraper

Do bezpiecznego i skutecznego pobierania kości autologicznej

Bone Scraper umożliwia bezpieczne i skuteczne pobieranie fragmentów autologicznej kości korowej do wykorzystania w zabiegach regeneracyjnych w chirurgii jamy ustnej.

Dzięki okrągłemu ostrzu skrobaka do kości można używać na powierzchniach o różnych kształtach (płaskich, wklęsłych lub wypukłych).

Cechy produktu

- Możliwość obracania ostrza o 360 stopni zapewnia cztery ostre krawędzie, co maksymalizuje pobieranie kości
- Ergonomiczna rękojeść zapewnia wygodny chwyt i kontrolę podczas użytkowania
- Łatwe i szybkie pobieranie kości dla większego komfortu pacjenta



Rozmiar oryginalny

Sposób użycia



Mocno docisnąć przednią część narzędzia do powierzchni kości i pociągnąć do tyłu.



Delikatnie popchnąć palcem przezroczystą komorę do przodu i rozsunąć ją, aby zebrać pobrane wióry kostne za pomocą instrumentu.



Jeśli ostrze stępi się, należy użyć śrubokręta hex 1.2 mm, aby obrócić je o 90 stopni i uzyskać nową ostrą krawędź.

Informacje dla zamawiających

Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania
BSF-5P	Bone Scraper, sterylny, jednorazowego użytku	5 sztuk

Nasze usługi i dostawy są świadczone wyłącznie na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych.



Polska

BioHorizons Camlog Sp. z o.o. | Elektrownia Powiśle | Ul. Wyrbrzeże Kościuszkowskie 43b | 00-347 Warszawa
Tel. +48 730 011 779 | Info.pl@camlog.com | www.biohorizonscamlog.pl

Headquarters

CAMLOG Biotechnologies GmbH | Margarethenstr. 38 | 4053 Bazylea | Szwajcaria
Tel. +41 61 565 41 00 | Faks +41 61 565 41 01 | info@camlog.com | www.bhclgroup.com

Wytwórca Bone Scraper:
OSUNG MND CO., LTD. | 57, Hwanggeum-ro 109 beon-gil | Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 10048 | Korea